


# COMO COLOCAR E AJUSTAR

1

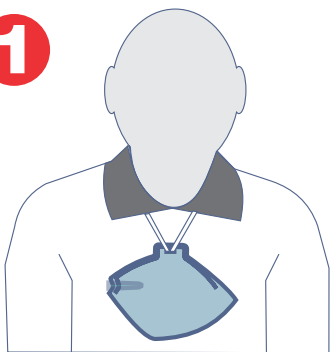


Retirar o respirador da embalagem. Puxar o ajustador até a extremidade do tirante. Passar o tirante sobre a cabeça e apoiar no pescoço ficando o respirador sobre o peito.

2



Segurar o respirador na parte inferior, puxar o tirante que se encontra na área interna do respirador para cima e colocar na parte superior da cabeça, levando o mesmo ao rosto.

3

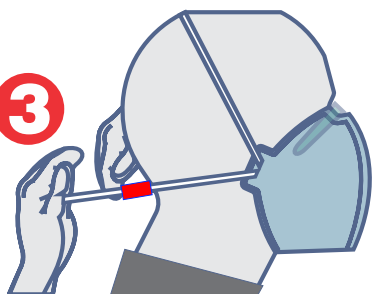

Segurar a extremidade do tirante e puxar o ajustador em direção à nuca, até sentir que o respirador está bem ajustado ao rosto .

4



Ajustar a presilha nasal ao nariz, cobrir o respirador com as duas mãos e exalar vigorosamente. Caso haja escape de ar, devem ser seguidas as instruções contidas no PPR - Programa de Proteção Respiratória-Fundacentro.

Para retirar o respirador, puxar o ajustador para a extremidade do tirante. Puxar o tirante superior para frente e o respirador para baixo, fechar o respirador e repousar sobre o peito.

## INSTRUÇÕES DE USO

### APLICAÇÕES

A máscara descartável MASKFACE é um respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante de partículas que se aplica a proteção das vias respiratórias do usuário contra: poeiras e névoas (PFF-1 S); poeiras, névoas e fumos (PFF-2 S); poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (PFF-3 S); poeiras, névoas e fumos, mais vapores orgânicos abaixo do nível de ação (PFF-2 S PLUS); poeiras, névoas e fumos, mais vapores orgânicos/gases ácidos abaixo do nível de ação (ABPFF-2 S).

(S): PFF indicada somente para uso contra aerossóis sólidos e de líquidos base água.

CLASSE	LIMITAÇÕES DE USO (A) (B)
PFF-1S	Poeiras e névoas até 5 vezes o limite de tolerância
PFF-2S	Poeiras, névoas e fumos até 10 vezes o limite de tolerância
PFF-3S	Poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos até 10 vezes o limite de tolerância

(A) As máximas concentrações de uso não podem ser superiores ao valor Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde (I.P.V.S.);

(B) Para maiores informações, consultar o PPR (Programa de Proteção Respiratória: Recomendações, Seleção e Uso de Respiradores – FUNDACENTRO).

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Somente pessoas treinadas e qualificadas devem utilizar este respirador;
- Observar as regulamentações nacionais;
- Ler e entender a instrução de uso;
- Conhecer o tipo e a concentração dos contaminantes e escolher o respirador adequado para uso;
- Substituir o respirador quando sentir desagradável resistência à respiração;
- Não utilizar se o respirador estiver danificado;
- O respirador não oferece manutenção;
- O respirador deve ser descartado após no máximo o uso por um turno de trabalho, se aplicável;
- A concentração de oxigênio do ar respirável deve ser, no mínimo, 18% ao nível do mar.

### ADVERTÊNCIAS:

- Verificar a vedação facial antes da utilização. Pessoas com barba, costeleta ou cicatriz profunda na área de vedação do respirador ao rosto são contra-indicadas ao uso;
- O respirador não deve ser utilizado em ambientes sem ventilação, fossos e canalizações;
- O respirador não deve ser utilizado em atmosferas: explosiva, ou deficiente de oxigênio, ou rica em oxigênio, ou IPVS;

### ARMAZENAMENTO E GUARDA


Armazenar o respirador em local protegido contra agentes físicos e químicos tais como: vibração, choque, luz solar, calor, frio extremo, umidade em excesso ou agentes químicos agressivos, até o prazo de validade, desde que na embalagem lacrada.

Condições de armazenamento:

Temperatura ambiente: - 10 à +40 °C

Umidade relativa: menor que 80%


### COMO COLOCAR E AJUSTAR

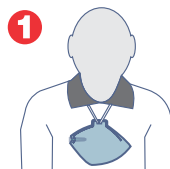


1 Retirar o respirador da embalagem. Puxar o ajustador até a extremidade do tirante. Passar o tirante sobre a cabeça e apoiar no pescoço ficando o respirador sobre o peito.



2 Segurar o respirador na parte inferior, puxar o tirante que se encontra na área interna do respirador para cima e colocar na parte superior da cabeça, levando o mesmo ao rosto.

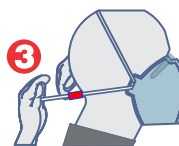

3 Segurar a extremidade do tirante e puxar o ajustador em direção à nuca, até sentir que o respirador está bem ajustado ao rosto.

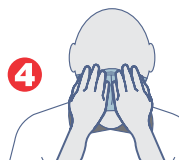

4 Ajustar a presilha nasal ao nariz, cobrir o respirador com as duas mãos e exalar vigorosamente. Caso haja escape de ar, devem ser seguidas as instruções contidas no PPR - Programa de Proteção Respiratória-Fundacentro.

Para retirar o respirador, puxar o ajustador para a extremidade do tirante. Puxar o tirante superior para frente e o respirador para baixo, fechar o respirador e repousar sobre o peito.